
S8C Многофункциональное устройство (OPT + SHR+Вакуум+ биполярный RF) для удаления волос, омоложения кожи, лечения сосудистых поражений и акне, уменьшения морщин и отбеливания кожи





S8C Многофункциональное устройство (OPT + SHR+Вакуум+ биполярный RF) для удаления

волос, омоложения кожи, лечения сосудистых поражений и акне, уменьшения морщин и

отбеливания кожи.

4 В 1 Многофункциональный ОРТ Машина Для Удаления Волос И Омоложения Кожи

S8C

Частота SHR 1-12Hz

Ручки разного размера
подходят для разных
областей лечения

Технология всасывания ОРТ

Самая современная
многофункциональная
машина ОРТ с полной конфигурацией

Теория лечения


S8C Многофункциональное устройство использует технологию OPT (Оптимальная импульсная технология)

Каждый свет из обычного IPL имеет первый пик энергии импульса ,который работает на месте пересечения дермиса и эпидермиса, в котором собирает многие меланины и сосуды,и в тоже время имеет многие нервы,когда меланины и сосуды поглотили энергии в пером импульсе ,и зарождение большие количества теплоты,которые стимулирует нервные окончания и причинит боль. И в тоже времени уменьшает энергии каждого света из IPL, кроме первого импульса дргие импульсы почти без эффекта лечения.

OPT устройство решает проблемы снижения энергии из обычного IPL и уменьшает первый пик энергии импульса, одинаковые энергии в каждом импульсах, мы будем чувствовать себя менее болезненным, а эффект лучше, чем обычный IPL, и сократили процедуры.


Принцип Лечения

S8C использует технологию всасывания OPT и режим двойной безопасности в сочетании с применением принципа селективного света и тепла IPL, которые усиливают эффект омоложения, удаление веснушек и волос и удаление волос, а также восстановление кожи и удаление волос без видимых болей и побочных эффектов во время лечения. Веди инструмент E-light в более безопасный, эффективный и более безболезненный век.

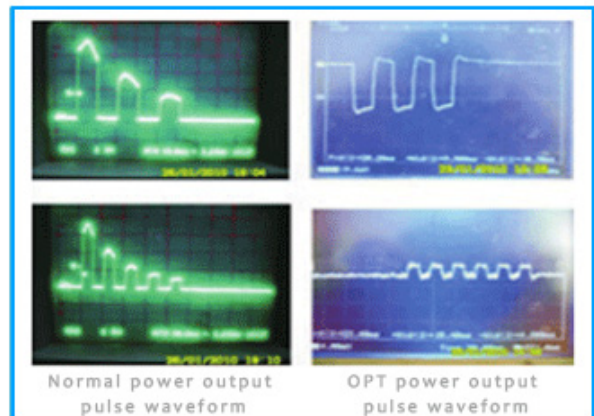

Общий E-light

Обычное электронное освещение может рассеиваться и образовывать большое количество тепла на эпидермисе и кожном сосочке. Эпидермис легко повредить.

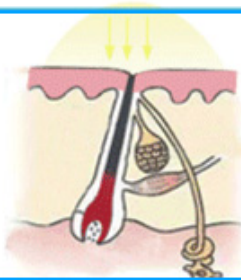


S8C

S8C может образовывать мало тепла на эпидермисе и кожном сосочке, теплового повреждения эпидермиса можно эффективно избежать.

Применения:

1. Удаление волос
2. Удаление прыщей и акне
3. Уменьшение морщин
4. Отбеливание кожи
5. Лечение сосудистых поражений
6. Омоложение кожи.
7. Лечение пигментных поражений в эпидермисе

Показать
Подробности

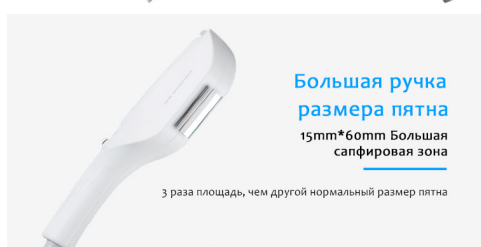

**Уникальная ручка
для удаления волос**

Размер пятна 8mm*40mm

Уникальная присоска собирает энергию в ткани мишени, уменьшает боль при лечении, сокращает время лечения.



Фильтр сменная ручка с пятью фильтрами

Омоложение кожи
530-1200nm

Улучшить текстуру кожи, нежные поры и омоложение кожи

Сосудистые поражения
585-1200nm

Лечить покраснение лица, чувствительную кожу и сосудистые поражения

Удаление волос
610-1200nm

Навсегда удалить волосы на теле

Пигментные поражения
560-1200nm

Пигментные поражения (пятна), пятнистый себорейный кератоз

Удаление прыщей
430-1200nm

Эффективное улучшение пропионикбактериальных угрей и решение угрей и решение

Особенности и преимущества

1. Инновационная технология ОРТ обеспечивает стабильный выход энергии каждого импульса и приносит безопасный и безболезненный и эффективный результат клиентам.
2. Уникальная вакуумная технология, обеспечивающая более эффективный клинический результат. Вакуум всасывает обрабатываемый участок кожи, что дает более эффективную доставку энергии клеткам мишеням, и снижает поглощение энергии окружающими тканями, что снижает болезненность и улучшает результат от процедур.
3. Разумный интерфейс очень удобен для мастера.
4. Большой размер пятна 15мм * 60мм обеспечивает быстрое лечение.
5. Наименьший размер пятна 10мм * 10мм обеспечивает легкое лечение для любых локализованных областей.
6. Четыре ручки и гибкая комбинация обеспечивают наиболее эффективное лечение.
7. В режиме SHR частота 1-12 Гц обеспечивает быстро лечить.

Преимущества

Безопаснее



Отсос энергии OPT для эпидермиса значительно улучшает лечебный эффект и становится более безопасным по сравнению с обычным OPT.

Более эффективно



Уникальная функция всасывания собирает энергию в ткани-мишени, значительно сокращает время лечения по сравнению с обычным лечением электронным светом.

Быстрее



Более быстрый слайд-режим значительно повышает эффективность и быстрее удаляет волосы

Более удобный



Эпидермальный уменьшить поглощение света сделал меньше боли, функция всасывающего массажа повышает комфортность лечения.

Более всеобъемлющий



С наименьшей в мире ручкой размера пятна обеспечьте различные зоны обработки и высокую плотность энергии.

Product link : <https://ru.honkonglobal.com/s8c-2.html>